



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

HOME 2G

Användarmanual

Innehåll

| | |
|---------------------------------------|---|
| Inledning | 2 |
| Delar i paketet | 2 |
| Knappsatsen | 2 |
| Strömförsörjning | 2 |
| Laddstation CHARGE | 3 |
| Väska | 3 |
| Kom igång med HOME 2G | 3 |
| Slå på enheten | 3 |
| Slå av enheten | 3 |
| Generella funktioner | 4 |
| Ljudnivå | 4 |
| Vibration | 4 |
| Programmering | 5 |
| Lägga till en sändare | 5 |
| Radera en sändare | 6 |
| Frekvens | 7 |
| Driftläge | 7 |
| Visar teknisk information om HOME 2G. | 7 |
| Larmmottagning | 7 |
| Assistanslarm | 7 |
| Felsökning (Q&A) | 8 |
| Säkerhetsinfo | 8 |
| Skötsel och underhåll | 8 |
| Tekniska data | 9 |



Inledning

HOME 2G är en portable larmmottagare med enkel funktionalitet och hög användarvänlighet.

Delar i paketet

- 1 x HOME 2G enhet
- 1 x AC-adapter, 230 V



- Denna användarmanual

Beroende på produktpaket kan det även medfölja:

- 1 x Mini USB-adapter



Om någon del saknas eller är defekt, vvv kontakta din återförsäljare.

Knappsatsen



Benämning

| # | Benämning |
|---|-----------|
| 1 | Pil Upp |
| 2 | Pil Ner |
| 3 | Retur |
| 4 | Larmknapp |

Strömförsörjning

AC adaptern kan användas med antingen Mini USB-adapter (tillval) eller laddstationen CHARGE (tillbehör).



Innan enheten används för första gången bör batteriet laddas fullt.

Mini USB-adaptor (tillval)

Anslut AC-adaptern till HOME 2G med Mini USB-adaptern. Snäpp fast adaptern mot undersidan från knappsatsen så den snäpper fast i baksidan på höljet.



Var noga med att koppla MiniUSB adaptern korrekt!



Om HOME 2G är påslagen när den ansluts till laddaren, visas popup bilden Laddar batteri.



Laddstation CHARGE



Laddstationen CHARGE finns i enkel och multiutförande för laddning av fler enheter samtidigt.

Väska

Som tillbehör finns även en praktisk väska som skyddar enheten och gör att HOME 2G kan bäras i bältet.

Kom igång med HOME 2G

Slå på enheten

Tryck Pil upp och håll intryckt i 3 sekunder. Efter uppstarten visas huvudskärmen.



Slå av enheten

Tryck Pil upp i 3 sekunder. Koppla bort ev USB-kabel eller avlägsna från laddstationen innan enheten slås av.

Generella funktioner

- Navigera upp och ner i menyerna genom att trycka på Pil upp och Pil ner.
- Det aktuella värdet/valet är markerat i mörkgrått.
- Bekräfta/välj ett värde genom, att trycka på Retur.
- Återgå till huvudskärmen genom att välja Avbryt från huvudmenyn.
- Välj Tillbaka i en meny för att återgå till den föregående menyn.
- Återgå direkt till huvudskärmen från genom att välja Tillbaka och hålla Retur nertryckt.
- Pop up bilder stängs automatiskt efter 5 sekunder.

Gå in i menyerna

Gå in i menyerna genom att trycka på Pil ner från huvudskärmen och hålla intryckt i 2,5 sekunder.



Statusrad



De fyra ikonerna i statusraden är från vänster till höger:

- Ljud på
- Vibrator på
- Nytt larm
- Batteriet laddar/batterinivå

Inställningar

Ljudnivå

Justera ljudnivån i Huvudmeny> Inställningar>Ljudnivå.

Vibration

Slå på eller av vibration i Huvudmeny> Inställningar>Vibrator.

Bakgrundsbelysning

Slå på eller slå av displayens bakgrundsbelysning och ändra dess tidsparametrar i Huvudmeny> Inställningar>Belysning.



Genom att välja "alltid på" minskas standby tiden i batteridrift avsevärt.

Programmering

Lägga till en sändare

Gå till Huvudmeny> Programmering>Lägg till sändare.



Ett pop up fönster visas och ber om aktivering av sändaren.



Aktivera sändaren. När en sändare mottagits, visar HOME 2G fönstret

Lägg till sändare.



Ange identifierare

Välj Larmklocka från menylistan och bekräfta.



Bläddra ner till fältet med fyra siffror och skriv in 1 i positionen längst till vänster.



Bekräfta valet genom att trycka Retur.



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se



Välj Spara för att bekräfta sändarinställningarna eller Avbryt för att avbryta



Sändaren är sparad.


Totalt 3 (tre) sändare kan läggas till i HOME 2G.

Radera en sändare

Gå till Huvudmeny>Programmering>Ta bort sändare.



Välj sändare i listan och tryck Retur.

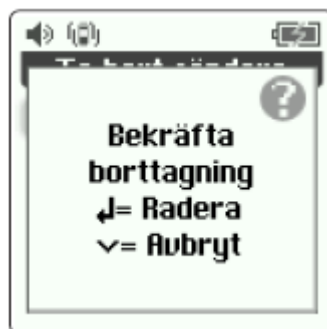

Tryck Retur för att radera vald sändare (eller Pil ner för att avbryta).



Sändaren är nu raderad.



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

Frekvens

Ange den frekvens som enheten skall verka i.

- 868.7 MHz
- 869.2 MHz (Standard)
- 869.4 MHz
- 869.2/869.4 MHz
- 906 MHz

Driftläge

Ange om enheten skall användas fristående eller tillsammans med trygghetstelefon NEO.

- Fristående (Standard)
- Trygghetslarm

Skall enheten användas med trygghetstelefon NEO måste NEO konfigureras i NEO Programmer och Telefonnummer A på fliken Larmkällor måste anges protokollet TREX/HOME.

Teknisk info

Visar teknisk information om HOME 2G.

Larmmottagning

Aktivera en inlagd sändare. HOME 2G kommer att pipa och ett popup fönster visar larmet.



Brevsymbolen i statusraden visar att det finns ett nytt larm och 1(1) i nederkanten visar att detta är det första av totalt 1 nya larm.

Informationen som visas:

- Utrustning (Larmklocka)
- Radio ID (1000)
- Larmorsak (Larm)



Tryck Retur för att kvittera larmet, stänga pop up fönstret och återgå till huvudskärmen.

Assistanslarm

Tryck och håll Alarmknapp nertryckt i 2,5 sekunder för att skicka ett assistanslarm till alla andra HOME 2G i systemet.



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

När larmet skickats visas pop up skärmen nedan.



Felsökning (Q&A)

Q: HOME 2G startar inte

A: Är batteriet fulladdat?

A: Är HOME 2G ansluten via USB (laddstation) till en dator? Om ja, koppla ifrån och försök igen.

Q: HOME 2G reagerar inte på larm från inlagda sändare

A: Är sändaren korrekt inlagd i HOME 2G? Se Lägga till en sändare.

A: Är Frekvens i enheten ändrad/korrekt?

Säkerhetsinfo

- Försök inte öppna enheten eller laddaren. För reparation, kontakta en NEAT återförsäljare.
- Batteriet har en begränsad livslängd. Batteribyte får enbart utföras av utbildad personal.
- Använd endast originalladdare, art nr: NE31 05001-06.

Skötsel och underhåll

- Undvik långvarig exponering i direkt solljus.
- Håll enheten borta från damm, fukt och smuts.
- Vrid, skaka, bänd eller kasta inte enheten.
- Utsätt inte enheten för värme och håll den borta från öppen eld.
- Rengör enheten med en mjuk trasa, lätt fuktad med en mild tvållösning. Rengör inte med starka kemikalier eller lösningsmedel.
- Den uttjänta produkten skall återvinnas och får inte behandlas som hushållsavfall. Återlämna till återvinningsstation eller returnera till NEAT Electronics AB.



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

Tekniska data

| | |
|------------------|--------------------------|
| Standby tid | Ca. 8 dagar |
| Mått (W x H x D) | 48 x 100 x 21 mm |
| Vikt | Ca 60g, inkl. batteri |
| Display | 128 x 128 pixels, 256 |
| Temp range | +5 - +55°C |
| Batterityp | Li-Po, 600 mAh |
| Radiofrekvens | 868.7 MHz |
| | 869.2 MHz (Sociala larm) |
| | 869.4 MHz |
| | 906.0 MHz |