

Sug- och blåslarm

Produktblad

Inledning

Sug/blåshållare H-SB kan användas av gravt rörelsehindrade för att styra funktioner med hjälp av sug- och blås. Till H-SB skall en pneumatisk kontakt anslutas.

Pneumatisk kontakt ingår ej i H-SB.


Montering

Montera H-SB på ett bord enligt bild.

Montering av salivavskiljare

Salivavskiljare används för att skydda den pneumatiska kontakten från onormalt mycket saliv och därigenom säkerställa en god funktion. Har brukaren liten salivproduktion behöver inte salivavskiljare monteras.

- Plocka bort skyddstejpen som sitter på hållaren för salivavskiljaren.
- Fäst hållaren på baksidan av stålkryssleden.
- Sätt salivavskiljaren i hållaren.
- Anpassa slangarnas längd och anslut den pneumatiska kontakten.

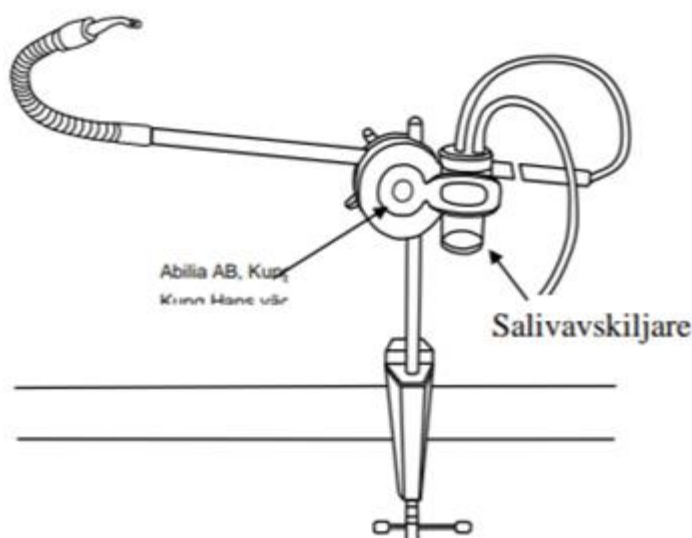


Rengöring och underhåll

- Det är viktigt att munstycket rengörs regelbundet så att en säker funktion bibehålls. Hålet i munstycket kan lätt täppas igen. Använd piprensare för att rengöra hålet i munstycket. Munstycket kan rengöras med lätt fuktad trasa.
- Salivavskiljare kan tas bort och diskas. Diskmedel kan användas vid rengöringen, skölj med rent vatten.
- Byt slang 1 ggr/år och munstycke minst 2 ggr/år.
- Övriga delar rengörs med en fuktig trasa som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torka med torr trasa.

Varning!

För att tillse att inga olyckor sker, beakta följande:

- Slang och munstycke är anpassat för att sitta ordentligt tillsammans. Slang och munstycke får bara bytas ut mot originaldelar från Gewa AB.
- Byt munstycket om det blivit skadat.
- Vid byte av munstycke, klipp av en bit av slangen och se till att slang skjuts på ordentligt enligt figur.

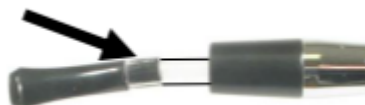

- Om munstycket sitter löst, byt munstycke och slang.

Förbrukningsartiklar

8160 Munstycke (sats om 5 stycken)

8161 Plastslang (i metervara)

8170 Salivavskiljare

Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet

Sug/båshållare H-SB marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för rörelsehindrade och uppfyller kraven i Medicintekniska direktivet 93/42/EEC

