



Zafe Care Systems  
Industrigatan 2  
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210  
Service: 010 20 96 220  
Fax: 044 780 95 50  
E-mail: [info@zafe.se](mailto:info@zafe.se)  
[www.zafe.se](http://www.zafe.se)

# INKA

## Produktblad

- Enhet för mottagning av larm från larmsändare via radio
- Kommuniserar på harmoniserad EU frekvens speciellt tilldelad trygghetslarm
- Dubbelriktad talkommunikation säkerställer att radioförbindelsen fungerar
- Hanterar 5 digitala eller 3 digitala och 2 analoga ingångar
- Ingångar kan konfigureras för att reagera på slutningar, brytningar eller analoga gränsvärden
- Kan strömförsörjas med antingen batterier eller AC-adapter med batteribackup
- Upp till 10 års batterilivslängd
- Ger larm för nätbortfall och låg batterinivå
- Valfritt automatiskt provlarm till trygghetstelefon





Zafe Care Systems  
Industrigatan 2  
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210  
Service: 010 20 96 220  
Fax: 044 780 95 50  
E-mail: info@zafe.se  
www.zafe.se

## INKA Tillbehörssändare

INKA Tillbehörssändare används främst för att koppla tillbehör till trygghetstelefon NOVO.

Tillbehören kan exempelvis vara dörr-, säng eller mattlarm. Eftersom INKA reagerar på en slutning eller brytning av en strömslinga, kan alla tillbehör som har reläutgång användas tillsammans med trygghetstelefonen.

INKA kan även sända larminformation till radiomottagare LINK.

## Aktivering av sändaren

INKA kan övervaka 5 digitala ingångar eller 3 digitala och 2 analoga. Ingångarna kan konfigureras att reagera på slutningar, brytningar samt analoga gränsvärden.

## Radiokommunikation

INKA sänder och tar emot all information på den harmoniserade EU frekvens som är speciellt tilldelad för trygghetslarm. Tack vare att INKA fungerar som en transeiver, där sändaren även fungerar som mottagare, fås alltid ett kvitto på att larmet har nått mottagaren.

## Strömförsörjning

INKA strömförsörjs normalt ifrån två alkaliebatterier av AAA-typ, men kan även användas med AC-adapter eller där 12V-system är tillgängligt. Batterilivslängden är upp till 10 år lång, beroende på vilka funktioner som har aktiverats.

## Batteribackup

Om INKA drivs med AC-adapter och ett strömavbrott skulle inträffa skickas ett nätbortfallslarm till huvudenheten. Därefter drivs enheten av ett inbyggt backup-batteri som kan vara laddningsbart eller av alkalintyp.

Det är viktigt att larmcentralen sedan får reda på när batteriet i INKA håller på att ta slut. Därför skickas ett batterilarm när batterispänningen understiger en viss nivå.

## Förbikopplare

Det är möjligt att avaktivera INKA med hjälp av strömbrytaren på sidan. Detta kan vara användbart när INKA används tillsammans med exempelvis ett dörrlarm.

Det är också möjligt att ange en fördröjning för in- och utpassage utan att dörrlarmet aktiveras i onödan.

## Programmering

All enkel programmering görs via byglar inne i apparaten, medan eventuella avancerade inställningar görs via dator.

## Automatiskt provlarm

För att säkerställa funktionen hos larmsändaren, kan INKA konfigureras att regelbundet skicka ett provlarm till huvudenheten. Hur ofta man vill att provlarmet ska skickas kan väljas och vid behov ändras av kunden.



Zafe Care Systems  
Industrigatan 2  
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210  
Service: 010 20 96 220  
Fax: 044 780 95 50  
E-mail: [info@zafe.se](mailto:info@zafe.se)  
[www.zafe.se](http://www.zafe.se)

## Tekniska data

INKA uppfyller samtliga av EU ställda krav för CE-märkning.

Frekvens: 869.200-869.250 MHz

CE-direktiv: R&TTE 1999/5/EC

LVD 73/23/EEC

EMC 89/336/EEC

Normer: EN 60950-1:2001

EN 301489-3 v1.4.1

EN 300220-3 v1.1.1

Bredd: 89 mm

Höjd: 63 mm

Djup: 26 mm

Vikt: 85 g